

Die NORSAN Fettsäure-Analyse

bietet die Möglichkeit, den individuellen Versorgungsstatus im Körper zu messen. Analysiert wird das Fettsäuremuster in der Erythrozytenmembran. Der Test gibt eine Aussage über die Versorgung der letzten 60-90 Tage. Insgesamt werden 26 Fettsäuren, die mehr als 99 % aller Fettsäuren im Körper entsprechen, gemessen.

Neben den Einzelwerten der Fettsäuren liefert die Analyse eine Aussage zum Omega-6:3-Verhältnis und dem HS-Omega-3-Index.

Der HS-Omega-3 Index hat eine hohe Aussagekraft in der Prävention und Therapie von Erkrankungen, z.B. von Herzerkrankungen und chronisch entzündlichen Erkrankungen.

Die Analytik erfolgt nach einem standardisierten und qualitätsgesicherten Verfahren in einem führenden unabhängigen Speziallabor.

Bitte lesen Sie sich die Informationen und die Anleitung vor der Durchführung aufmerksam durch.

Wichtige Hinweise:

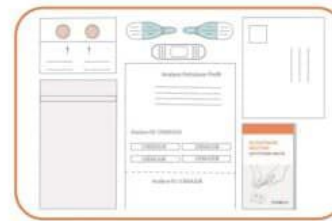
- Die Fettsäure-Analyse und das Blutentnahme Set sollten unzugänglich für Kinder aufbewahrt werden
- Eine Anwendung der Fettsäure-Analyse darf nur von Erwachsenen ab 18 Jahren durchgeführt werden
- Verwenden Sie das Blutentnahme-Set nur einmalig
- Bei einer Blutungsneigung sowie in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit wenden Sie sich bitte vorab an Ihren Arzt oder Therapeuten
- Ist die Durchführung alleine nicht möglich, führen Sie bitte diese Entnahme nur im Beisein einer weiteren Person durch oder wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Therapeuten.
- Halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt und mit uns, wenn Sie an einer durch Blut übertragbaren Krankheit leiden.

Vorbereitung:




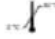

- Die Blutentnahme sollte in nüchternem Zustand durchgeführt werden (mind. 4h).
- Bitte verzichten Sie 24 Stunden vor der Blutentnahme auf hochdosierte Omega-3 Produkte.
- Legen Sie alle enthaltenen Utensilien auf eine saubere Unterlage vor sich hin.
- Am besten eignen sich Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger der linken Hand für die Einstichstelle. Sollten Sie Linkshänder sein, nehmen Sie die rechte Hand.

Das Analyse-Set enthält:

- 2x BD Microtainer® kontakt aktivierte Lanzette CE (Artikelnr. 366594)
- 1x Folienbeutel
- 1x Testkarte
- 1x Pflaster
- 1x Rücksende-Umschlag
- 1x Anleitung zur Blutentnahme
- 1x Analyse-ID-Bogen mit ID Aufkleber



Verpackung Symbolerklärung

-  Europäische Konformität
-  Nur zum einmaligen Gebrauch
-  Grüner Punkt – Duales System Deutschland (DSD) GmbH
-  Lagerung zwischen 2°C und 30°C
-  In-vitro-Produkt

BLUTENTNAHME ANLEITUNG ZUR FETTSÄURE-ANALYSE

